

## Vigtig information til praksis

Kære praksis

Vi har i den seneste tid oplevet rigtig mange blodprøverør, hvor stregkoderne har været placeret forkert, printet skævt og af meget dårlig kvalitet.

Det betyder vi her på Klinisk Biokemisk Afdeling skal printe nye stregkoder til disse blodprøverør, hvilket nedsætter svarhastigheden og øger risiko for fejl.

Nogle stregkoder er ulæselige og kan derfor ikke tydes, og der kan ikke udføres analyser. Klik [her](#) for at se eksempler

Vi håber derfor meget på I vil hjælpe os med at løse dette problem.

Korrekt placering af stregkode.



**Vigtigt at stregkoden vender denne vej!**



### Mærkning af prøver

Prøverørene skal mærkes inden blodprøvetagning foretages.

Prøveidentifikationen sikres ved de selvklæbende, nummererede etiketter fra PTBéns højre side. Vær opmærksom på, at hver etikette har unikt nummer, og dette skal svare til det nummer, der står ud for analysen på laboratoriehenvisningen.

Stregkoden placeres lodret lige under proppen på det prøverør, der skal sendes/afleveres til Klinisk Biokemisk Afdeling.

NB: Hvis analysen ikke er fortrykt på etiketten, påføres denne. Bemærk dog, at der ikke må skrives for tæt på stregkoden.

På Klinisk Biokemisk Afdeling har personalet af sikkerhedsgrunde instruks om, at afvise eller destruere utilstrækkeligt mærkede prøver.

### Stregkode-etiketter, placering på prøverør:

Fyldningsmærke



Rekvirent  
Prøvenummer

Stregkode

Emballagetype  
Analyse,  
apparat,  
analysegruppe

5

Vejledning kan findes på, [laboratievejledning.rn.dk](http://laboratievejledning.rn.dk)



Ved spørgsmål kontakt laboratoriefaglig konsulent

Claus Woldum, tlf. 97 64 12 01 Regionshospital Nordjylland Hjørring

Britta Storvang, tlf. 20 54 77 87 Aalborg Universitetshospital, Aalborg

Lone Kjeldgaard, tlf. 97 65 01 50 Aalborg Universitetshospital, Thisted

